

www.salonreduca.com

(Publi Rédactionnel)

Game Ready

du nouveau dans La Cryothérapie



Des enveloppes adaptées à chaque partie du corps

Un procédé totalement innovant...

Le système **Game Ready** permet une application simultanée de froid et de compression intermittente à travers un système d'enveloppes adaptées à chaque partie du corps. Le froid, modulable, descend jusqu'à 0° dans l'enveloppe soit 10 à 12 degrés en surface cutanée et la compression est graduelle et intermittente de 0 à 75mm Hg au maximum.

...et très simple d'utilisation

Pour démarrer le traitement qui dure de 15 à 30 minutes selon les pathologies et les effets souhaités, il suffit d'appliquer l'enveloppe sur le patient puis de régler le niveau de pression maximum souhaitée et la durée du protocole. La température de l'enveloppe atteint 0° en moins de 5 secondes. Le patient ou le thérapeute peuvent alors moduler le froid en fonction du ressenti. La thérapie s'effectue sans aucun risque de brûlures pour le patient et la machine ne nécessite aucun consommable.

Des applications multiples

L'utilisation de Game Ready permet d'obtenir un effet thérapeutique très efficace sur de multiples pathologies grâce à l'application prolongée de froid dans un parfait confort du patient qui permet notamment d'obtenir le phénomène d'Échappement à la compression intermittente qui favorise la guérison des tissus.

Traumatologie du sport

Le succès rencontré par Game Ready dans les nombreuses équipes de sport professionnelles qui l'utilisent déjà démontrent l'efficacité de son action sur les pathologies musculaires du sportif telles que contractures, claquages, problèmes d'adducteurs, béquilles...

C'est ce qui a notamment plus à Christophe Foucaud, kiné au Stade Toulousain qui utilise l'appareil chaque jour pour soigner les joueurs et favoriser leur récupération et même lors des trajets de retour de matchs grâce à la batterie qui dure 6 à 8 heures.

Traitements post opératoires

Par son action sur les hématomes et les oedèmes post opératoires, le Game Ready est un outil de choix pour les traitements post opératoires immédiats comme en témoignent les kinésithérapeutes de la polyclinique Saint-Roch qui l'utilisent surtout à pression faible (25mm Hg) et observent «une diminution significative des hématomes et un soulagement immédiat et prolongé des patients ».


Rééducation et rhumatologie

En cabinet libéral, l'appareil s'avère être un complément de choix pour les protocoles de rééducation. Les thérapeutes du cabinet Mariotte à Perpignan l'utilisent particulièrement dans la rééducation des genoux et des épaules et soulignent que « l'effet antalgique est d'autant plus apprécié des patients lorsque le Game Ready est utilisé au terme de la séance ».

Patrick Mangin, kinésithérapeute à Toulouse, l'utilise majoritairement à pression moyenne soit « avant la séance pour endormir le patient soit après pour le soulager ». La simplicité d'utilisation permet même à ses patients de l'utiliser de façon autonome.

Il a également noté une action très efficace sur des périarthrites de l'épaule rendant ainsi, « après 2-3 séances de 20 à 30 minutes un réel confort de vie à ses patients ».

Un froid intense, diffus et durable

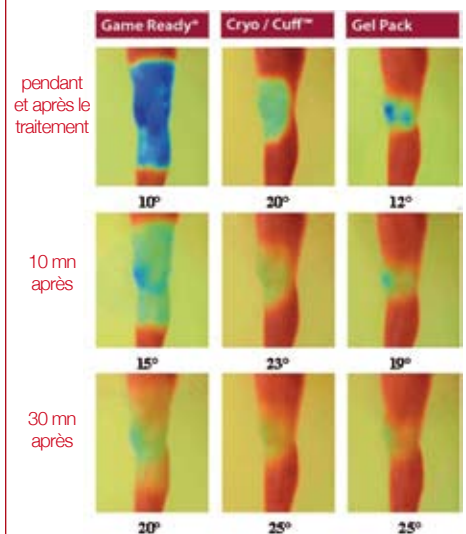

Les images thermiques ci-dessus montrent que l'utilisation de Game Ready permet d'obtenir un froid compressif intense (environ 10 degrés en surface cutanée pendant le traitement), durable et diffus sur l'ensemble de la zone lésée pour un effet thérapeutique optimal.

Efficacité thérapeutique, applications multiples, facilité d'utilisation et confort pour les patients sont donc les principales caractéristiques de ce nouveau système que nous vous invitons à découvrir.

Pour plus d'informations, contactez **GAME READY France**
T. 05.34.50.44.55